

Инструкции за употреба

Полумаска С ЛАСТИЦИ ЗА УШИТЕ.



Фиг. 1



Фиг. 2



Фиг. 3



Фиг. 4

Фигура 1

Поставете маската върху носа и устата.

Фигура 2

Поставете ластиците зад ушите, закачете ластиците към скобата (ако има такива), за да подобрите комфорта и да предотвратите възможността за всякакви течове.

Фигура 3

Сгънете носната тел (или накрайника за нос) с пръсти, за да я адаптирате към формата на носа.

Фигура 4


За да тествате работата на маската, сложете двете си ръце върху маската, след което енергично издишайте. Ако въздухът излиза от около носа, натиснете носовия проводник (или накрайника за нос). Ако въздухът излиза от краищата на маската, преместете клипа (ако има такъв).

- Сменете незабавно маската, ако дишането се затрудни или ако маската е повредена или деформирана.
- Сменете маската, ако няма подходящо уплътнение по лицето.
- Стриктното спазване на тези инструкции е важна стъпка за безопасното използване на маската.

Полумаска С ЛАСТИЧНА ЛЕНТА ЗА ГЛАВАТА.



Фиг. 1

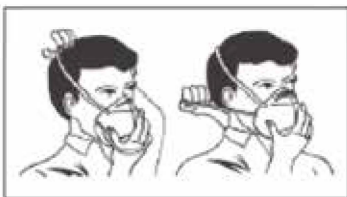

Фиг. 2



Фиг. 3



Фиг. 4

Фигура 1

Поставете маската върху носа и устата.

Фигура 2

Издърпайте горната лента над главата си, като я поставите високо в задната част на главата. Издърпайте долната лента над главата си и я поставете около врата си под ушите.

Фигура 3

Сгънете носната тел (или накрайника за нос) с пръсти, за да я адаптирате към формата на носа.

Фигура 4

За да тествате работата на маската, сложете двете си ръце върху маската, след което енергично издишайте. Ако въздухът излиза от около носа, натиснете носовия проводник (или накрайника за нос). Ако въздухът излиза от краищата на маската, преместете клипа (ако има такъв).

- Сменете незабавно маската, ако дишането се затрудни или ако маската е повредена или деформирана.
- Сменете маската, ако няма подходящо уплътнение по лицето.
- Стриктното спазване на тези инструкции е важна стъпка за безопасното използване на маската.

ВНИМАНИЕ

Преди употреба проверете маската за наличие на дефекти или несъвършенства; ако се съмнявате, изхвърлете маската и вземете нова.

По време на употреба избягвайте да докосвате маската директно: боравете с нея с помощта на еластичните ленти и във всеки случай винаги след като сте извършили правилно хигиенната процедура на ръцете.

Заменете маската с нова, суха и чиста, веднага щом използваната стане влажна. Отстранете маската, като избягвате да докосвате предната част, като използвате само еластичните ленти.

Не използвайте повторно използваните маски, изхвърляйте ги веднага след употреба.

Изхвърляйте използваните маски в съответствие с действащите разпоредби за изхвърляне на отпадъци. След изхвърляне, извършете правилно хигиенната процедура на ръцете.