

Лист с технически данни

PLUM Промивка за очи pH неутрално 4,9%

1. Идентифициране на продукта и компанията

1.1. Идентификатор на продукта и предназначение.

Търговско наименование: Plum промивка за очи pH неутрално 4,9% фосфат

Предназначение: Продуктите са предназначени да се използват като продукти за първа помощ за промиване на очите при инциденти, свързани с киселини и основи.

Срок на годност: Отпечатано върху етикета на бутилката.

1.2. Данни за доставчика на информационния лист

Производител

Компания: Plum Safety ApS

Адрес: Mandelalleen 1

Пощенски код: 5610

Град: Assens

Държава: ДАНИЯ

Електронна поща: info@plum.eu

Телефон: +45 6916 9600

Факс: +45 6916 9630

1.3 Законодателна информация

Обща информация: Тъй като продуктите са стерилни медицински изделия от клас 1s съгласно Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия, те са сертифицирани от нотифицирания орган **DNV Product Assurance AS**.
За медицинските изделия не се изисква информационен лист за безопасност.

Продуктите не се класифицират като опасни съгласно правилата за класификация и етикетиране на вещества и смеси.

Plum Safety ApS е сертифицирана съгласно ISO 13485:2016 Медицински изделия -- Системи за управление на качеството
-- Изисквания за регулаторни цели.

1.4 Инструкции за употреба:

Моночаша за очи (200 и 500 ml) / Чаша за очи с душ (1000 ml)



Чаша за очи DUO (500 ml)



-Винаги измивайте очите си с 0,9% натриев хлорид след като сте използвали вода за очи Plum pH Neutral 4,9% Phosphate!

-Не използвайте повторно.

-Не използвайте, ако е повреден.

-Препоръчителна температура при употреба



Лист с технически данни

PLUM Промивка за очи pH неутрално 4,9%

2. Обща информация за продукта

Изисквания към материалите: Материалите в тези продукти са оценени като биосъвместими в съответствие с Изисквания на ISO 10993-1:2009 Биологична оценка на медицински изделия. Част 1: Оценка и изпитване в рамките на процеса на управление на риска.

Размери на бутилката, етикета и чашката за очи.

	Бутилка от 200 ml	Бутилка от 500 ml	Бутилка от 1000 ml
Материал на бутилката	Полиетилен без добавки	Полиетилен без добавки	Полиетилен без добавки
Бутилката съдържа [ml]	201-207	505-512	1005-1020
Ø на дъното [mm]	58.5	78	90
Височина [mm]	129.6	183	229

3. Странични ефекти и неправилно функциониране

Странични ефекти и неизправности:

Продуктите са предназначени за първа помощ при промиване на очите. Ако се появят странични ефекти или неизправности, моля, съобщете за тях на Plum Safety ApS info@plum.eu или на телефон +45 6916 9600, за да бъдат предприети необходимите коригиращи мерки.
Сериозните нежелани ефекти винаги трябва да се съобщават на съответния компетентен орган.

4. Съхранение

Съхранение:

Срок на годност:

42 месеца от датата на производство.

Монтаж:

Моля, вижте пиктограмата на етикета:



Монтажни станции и кутии: Моля, посетете <https://plum.eu/products/firstaid/eye-wash>

5. Друга информация

История на версиите и индикация на промените

Версия	Дата на преразглеждане	Отговорно	Промени
1.3	25-05-2021	CL	1.2, 1.3, 3, 5
1.2	30-09-2020	CL	5
1.1	03-06-2020	CL / VWB	3, 5
1.0	14-04-2020	CL /VWB	

Друга информация Допълнителна информация можете да получите, като се свържете с info@plum.eu или на телефон +45 6916 9600.

TDS, изготвен от:

Компания: Plum Safety ApS
Адрес: Mandelalleen 1
Пощенски код: 5610
Град: Assens
Държава: ДАНИЯ
Електронна поща: info@plum.eu
Телефон: +45 6916 9600
Факс: +45 6916 9630

Език на документа: Български език